

F2

INDICAZIONI

INNODROPS F2 della gamma INNODROPS è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione lievemente ipotonica a media viscosità, sterile, a pH fisiologico, priva di conservanti, a base di estratto secco di Perilla Frutescens in combinazione con acido ialuronico, idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) e glicerina vegetale, contenuta in strip da 5 fiale monodose riempiti a 0,5ml.

L'estratto secco di Perilla Frutescens, grazie alla presenza dei polifenoli, svolge un'azione antiossidante che va a contrastare gli stati di arrossamento ed irritazione causati dagli stress ossidativi dovuto a fattori esterni sfavorevoli mentre la combinazione dell'acido ialuronico, l'idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) e la glicerina vegetale, conferisce alla goccia oculare un'intensa azione lubrificante ed emettente per la superficie oculare.





INNODROPS F2 è indicata per l'attenuazione della sintomatologia dell'occhio secco di forma moderata legata a:

- condizioni ambientali e climatiche sfavorevoli come l'uso dell'aria condizionata, vento, inquinamento atmosferico, clima secco, polveri, allergeni, fumo;
- stress oftalmico successivo ad un utilizzo prolungato di colliri contenenti conservanti nella terapia locale cronica;
- utilizzo prolungato di lenti a contatto;
- alleviare la sensazione di occhio secco in casi di blefariti e congiuntiviti allergiche
- insufficiente lacrimazione;
- utilizzo prolungato di dispositivi elettronici quali computer, smartphone, tablet, etc..

INNODROPS F2 può essere somministrato prima dell'applicazione e durante l'uso delle lenti a contatto per migliorare l'applicazione ed il comfort.

MODALITÀ PER L'USO:

1. Aprire la busta di alluminio.
2. Lavarsi accuratamente le mani
3. Separare la fiala monodose dallo strip ed aprirla ruotando il tappo.
4. Premere delicatamente il corpo della fiala monodose ed instillare 2/3 gocce in ogni occhio.
5. Dopo l'instillazione richiudere immediatamente la fiala e riutilizzare il contenuto residuo entro le successive 12 ore.
6. Conservare le fiale non utilizzate nella busta di alluminio sino al termine del contenuto.
7. Il prodotto in fiala è monopaziente per evitare possibili contaminazioni
8. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto

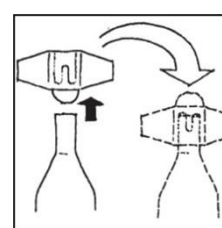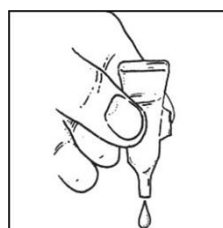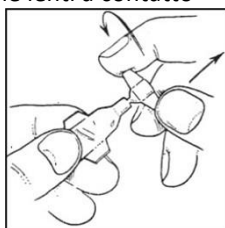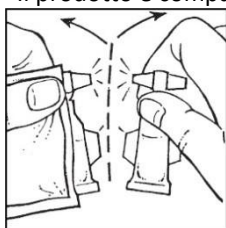

FREQUENZA D'USO: Instillare 2/3 gocce per occhio, 2-3 volte al giorno o secondo parere del medico

COMPOSIZIONE: Estratto secco di Perilla (titolato in polifenoli $\geq 2,5\%$) 0,1%, acido ialuronico sale sodico 0,25%, idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) 0,3%, glicerina vegetale 0,2%, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico anidro, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua purificata.

CONFEZIONE: La confezione è composta da 2 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 3 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 4 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 5 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 6 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.


AVVERTENZE:

- Il prodotto è solamente per uso oftalmico, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d'uso.
- Una volta aperta, la fiala monodose può essere richiusa con l'apposito tappo ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 12 ore per evitare possibili contaminazioni del prodotto
- Non utilizzare il prodotto se la busta in alluminio è danneggiata oppure se le fiale non sono perfettamente integre.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità di erogazione della fiala.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione
- Eventualmente accertarsi presso il proprio ottico della compatibilità delle gocce oculari con le lenti a contatto utilizzate.
- In caso di reazioni avverse durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- In caso di necessità, consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- L'eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- In caso di superficie oculare compromessa o cornea danneggiata consultare il medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ: 24 mesi a confezione integra



: Enable Innovations S.r.l. Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Carpi (MO), Italia

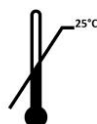

Pittogramma facoltativo



: XXXXXXXX