


INDICAZIONI

IN-NOSE BLUE SPRAY della gamma IN-NOSE è Dispositivo Medico ad uso topico nasale, a base di Tween 80, Acido ialuronico ed EDTA in soluzione ipertonica tamponata, senza conservanti, contenuta in flacone spray da 20 mL.

IN-NOSE BLUE SPRAY grazie all'azione combinata dell'EDTA e del Tween 80 in soluzione ipertonica, è indicato per la pulizia delle cavità nasali, in particolare per la diluizione e rimozione meccanica dello strato di biofilm batterico tipico delle rinosinusiti croniche e sindromi da raffreddamento, ristabilendo la clearance mucociliare. La presenza dell'acido ialuronico determina un'azione idratante ed emolliente attenuando la sensazione di secchezza della mucosa nasale e proteggendola da agenti esterni quali fumo, smog, polvere, polline, possibili cause di fenomeni irritativi.

MODALITÀ PER L'USO:

1. Lavarsi accuratamente le mani
2. Soffiarsi il naso prima dell'utilizzo
3. Agitare leggermente il flacone spray prima dell'uso
4. Rimuovere il cappuccio protettivo
5. Tenere il flacone spray con il pollice sotto la base e l'erogatore tra due dita
6. Al primo utilizzo premere la pompa spray azionandola qualche volta, fino a quando viene emessa una nebulizzazione uniforme
7. Inclinare leggermente la testa all'indietro e inserire il beccuccio in una narice
8. Spruzzare e contemporaneamente respirare delicatamente con il naso
9. Dopo l'uso pulire e richiudere l'erogatore spray con il cappuccio protettivo
10. Il prodotto è monopaziente per evitare possibili contaminazioni

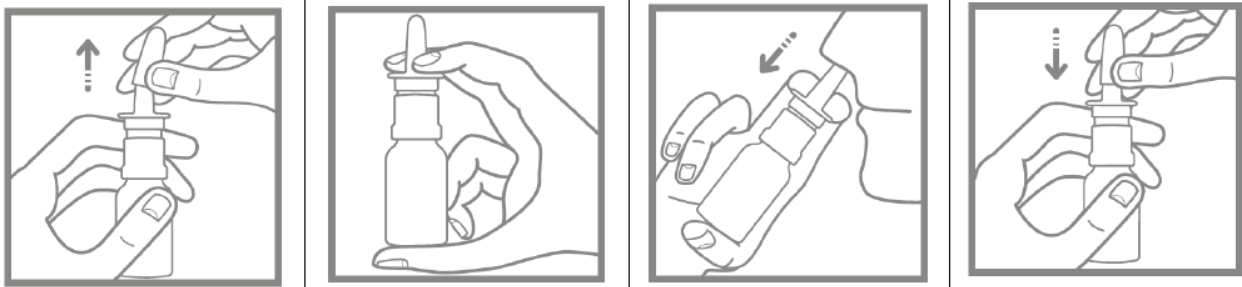

FREQUENZA D'USO: 1-2 nebulizzazioni per narice 2/3 volte al giorno, o secondo parere del medico.

COMPOSIZIONE: Acido ialuronico, sodio cloruro (2,5%), tween 80, EDTA, sodio fosfato bibasico diidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua purificata.

CONFEZIONE: La confezione è composta da un flacone spray da 20 mL. Il contenitore è richiudibile.

AVVERTENZE:

- Il prodotto è solamente per uso inalatorio, non ingerire o utilizzare diversamente dall'indicazione d'uso.
- Una volta aperto e utilizzato il flacone, il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 3 mesi per evitare possibili contaminazioni del prodotto.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non toccare altre superfici, oltre la mucosa nasale, con l'estremità di erogazione del flacone.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- In caso di reazioni avverse (bruciore, fenomeni irritativi ecc.) durante l'uso, sospendere il trattamento e consultare un medico.

- Consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- La somministrazione di farmaci o dispositivi medici per via nasale in contemporanea con lo spray nasale deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra.



Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Carpi (MO), Italia



0425



STERILE A



Pittogramma facoltativo



: XXXXXXX