

## INNODROPS BB

### INDICAZIONI

**INNODROPS BB** della gamma INNODROPS è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione isotonica, sterile, a pH fisiologico, priva di conservanti, a base di acido ialuronico, glicerina e acque distillate ed è contenuta in strip da 5 fiale monodose riempiti a 0,5mL.





La combinazione di acido ialuronico e glicerina conferisce alla goccia oculare un'azione protettiva, idratante ed umettante che stabilizza e reintegra il film lacrimale e minimizza gli attriti durante l'ammiccamento.

**INNODROPS BB** è indicata per alleviare gli stati di arrossamento ed affaticamento oculare proteggendo l'occhio da fattori ambientali ed atmosferici (inquinamento, smog, salsedine, acqua clorata, vento, polvere, fumo, clima secco, aria condizionata) o stress visivi dovuti principalmente ad un uso prolungato dei dispositivi elettronici (computer, smartphone, tablet), studio intenso, guida prolungata, esposizione prolungata ai raggi solari. **INNODROPS BB** è una soluzione rinfrescante indicata anche per coloro che soffrono di secchezza oculare occasionale o scarsa lacrimazione, donando sollievo agli occhi e ritrovando il benessere quotidiano.

**INNODROPS BB** può essere somministrato prima dell'applicazione e durante l'uso delle lenti a contatto per migliorare l'applicazione ed il comfort.

### MODALITÀ PER L'USO:

1. Aprire la busta di alluminio
2. Lavarsi accuratamente le mani
3. Separare la fiala monodose dallo strip ed aprirla ruotando il tappo
4. Premere delicatamente il corpo della fiala monodose ed instillare 2/3 gocce in ogni occhio
5. Dopo l'instillazione richiudere immediatamente la fiala e riutilizzare il contenuto residuo entro le successive 12 ore
6. Conservare le fiale non utilizzate nella busta di alluminio sino al termine del contenuto
7. Il prodotto in fiala è monopaziente per evitare possibili contaminazioni
8. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto

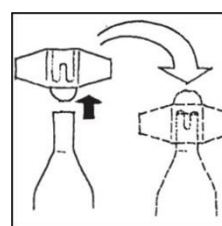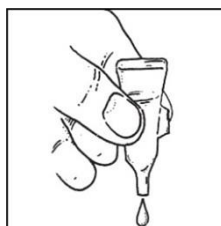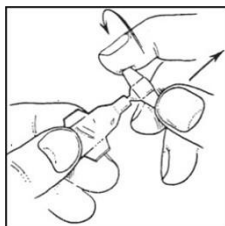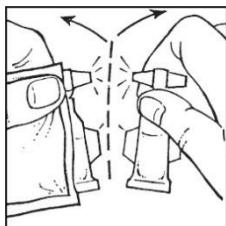

**FREQUENZA D'USO:** Instillare 2/3 gocce per occhio, 2-3 volte al giorno o secondo parere del medico.

**COMPOSIZIONE:** Acido ialuronico 0,15%, glicerina 0,2%, Acqua distillata di Vaccinium Myrtillus, Acqua distillata di Hamamelis Virginiana, Acqua distillata di Camomilla Recutita, Acqua distillata di Euphrasia Officinalis, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua purificata.

### CONFEZIONE:

La confezione è composta da 2 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose è riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 3 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose è riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 4 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose è riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 5 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose è riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 6 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose è riempita a 0,5mL è richiudibile.


## AVVERTENZE:

- Il prodotto è solamente per uso oftalmico, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d'uso.
- Una volta aperta, la fiala monodose può essere richiusa con l'apposito tappo ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 12 ore per evitare possibili contaminazioni del prodotto.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità di erogazione della fiala.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione
- Eventualmente accertarsi presso il proprio ottico della compatibilità delle gocce oculari con le lenti a contatto utilizzate.
- In caso di reazioni avverse durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- In caso di necessità, consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- L'eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- In caso di superficie oculare compromessa o cornea danneggiata consultare il medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

**VALIDITÀ:** 36 mesi a confezione integra.



: Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Carpi (MO), Italia

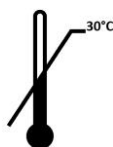

## Pittogramma facoltativo



: XXXXXXX