

## LIPOFRESH spray oftalmico

### INDICAZIONI

**LIPOFRESH** spray oftalmico è un Dispositivo Medico costituito da una soluzione leggermente iposmolare, sterile, a pH fisiologico, priva di conservanti, ad elevata biocompatibilità, a base di Liposomi e Acqua Madre delle Terme di Cervia, contenuta in un flacone spray da 10mL.

I liposomi sono ottimali per ripristinare e stabilizzare la componente lipidica presente sulla rima palpebrale, mentre gli elettroliti essenziali, presenti nell'Acqua Madre delle Terme di Cervia, riequilibrano tutte le condizioni di discomfort oculare ed instabilità lacrimale.

**LIPOFRESH**, grazie ai suoi componenti, è in grado di regolare, idratare e rinfrescare la mucosa oculare e di conferire un supporto funzionale alla superficie oculare. In questo modo si ricostituisce lo strato lipidico adibito al contenimento ed al controllo dell'evaporazione del film lacrimale.


L'uso di **LIPOFRESH** dona rapidamente sollievo ai più comuni fastidi oculari come bruciore, sensazione di corpo estraneo, secchezza, arrossamento ed affaticamento, che possono essere causati da:

- casi di sindrome dell'occhio secco in particolare causati dall'inadeguatezza qualitativa dello strato lipidico della superficie oculare,
- condizioni atmosferiche ed ambientali sfavorevoli (aria condizionata, clima secco o molto caldo, impianti di riscaldamento, vento, inquinamento, polveri, fumo, allergeni),
- stress visivi dovuti ad un lungo periodo di guida o di studio, all'uso prolungato delle lenti a contatto o di dispositivi elettronici (computer, televisione, videotermini, smartphone).

**LIPOFRESH** spray oftalmico può essere somministrato anche durante l'uso delle lenti a contatto per migliorare la lubrificazione oculare ed il comfort.

### MODALITÀ PER L'USO:

1. Prima di utilizzare il flacone è indicato detergere accuratamente le mani
2. Agitare leggermente il flacone spray prima dell'uso
3. Al primo impiego effettuare due erogazioni a vuoto
4. Durante l'erogazione mantenere il flacone in posizione verticale
5. Premere delicatamente sulla pompa spray ed erogare 1-2 spruzzi sulle palpebre chiuse a una distanza di 10cm
6. Dopo l'instillazione, riporre il flacone nell'astuccio e riutilizzare il contenuto residuo entro 3 mesi
7. Il prodotto è monopaziente per evitare possibili contaminazioni
8. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto

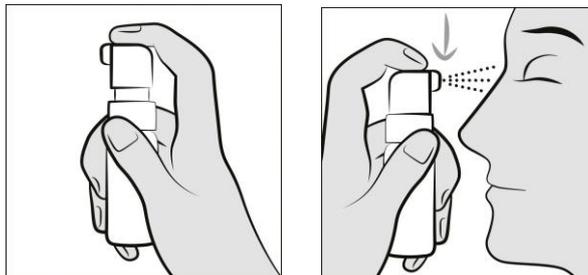

**FREQUENZA D'USO:** Si consiglia l'utilizzo per adulti e bambini dai 3 anni. Erogare 1/2 spruzzi sulle palpebre chiuse a una distanza di 10cm, 3-4 volte al giorno, o secondo parere del medico.

**COMPOSIZIONE:** Liposomi 1%, Acqua Madre delle Terme di Cervia 1%, Sodio Cloruro, Sodio citrato tribasico diidrato, Acido citrico monoidrato, Acqua purificata.

**CONFEZIONE:** La confezione è composta da un flacone spray da 10mL.

**AVVERTENZE:**

- Il prodotto è solamente per uso oftalmico, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d'uso
- Dopo la prima applicazione, il flacone deve essere conservato nell'apposito astuccio ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 3 mesi
- In caso di necessità, consultare il medico per l'utilizzo in bambini di età inferiore ai 3 anni e per l'uso in gravidanza e allattamento
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non spruzzare il prodotto sull'occhio aperto
- Prima dell'utilizzo controllare che non vi sia alcun residuo sul foro dell'erogatore, se presente pulire con un panno bagnato ed eseguire una nebulizzazione a vuoto
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità di erogazione del flacone
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- Eventualmente accertarsi presso il proprio ottico della compatibilità dello spray oftalmico con le lenti a contatto utilizzate
- In caso di reazioni avverse durante l'uso sospendere immediatamente il trattamento e consultare un medico
- L'eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni
- In caso di superficie oculare compromessa o cornea danneggiata consultare il medico
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.
- Il prodotto contiene soia

**VALIDITÀ:** 36 mesi a confezione integra



: Enable Innovations S.r.l. Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Carpi (MO), Italia



0425



STERILE A

**Pittogramma facoltativo**

: XXXXXXX