

CLEAN C

INDICAZIONI

Il lavaggio nasale **CLEAN C**, della gamma IN-NOSE, è un dispositivo medico a base di soluzione ipertonica con Vitamina C glucoside e Tween 80, a pH fisiologico, privo di conservanti, ad elevata biocompatibilità, in fiale monodose da 5 mL.

CLEAN C è indicato per l'igiene e la pulizia delle fosse nasali. Può essere utilizzato come coadiuvante nel trattamento delle affezioni delle alte vie respiratorie, in quanto libera e pulisce il naso svolgendo un'azione utile a contrastare sinusiti e riniti anche di natura allergica. Protegge la mucosa nasale da alterazioni causate da agenti esterni come fumo, smog, aria secca, polline, allergeni, germi e batteri. È indicato come decongestionante delle fosse nasali per liberare il naso chiuso.



L'azione antiossidante della Vitamina C glucoside consente una protezione della mucosa nasale dai danni ossidativi e infiammatori causati da agenti esterni come batteri, patogeni, virus e allergeni. Il Tween 80 svolge un'azione detergente di pulizia della mucosa, di diluizione e rimozione meccanica dello strato di biofilm batterico ristabilendo la clearance mucociliare. L'ipertonia della soluzione, grazie al trasporto di acqua indotto dalla pressione osmotica, decongestiona la mucosa e fluidifica e ammorbidisce il muco in eccesso favorendo la rimozione delle impurità intrappolate.

CLEAN C:

- offre un sollievo dalla congestione nasale (naso chiuso);
- aiuta a prevenire lo sviluppo di infezioni grazie all'azione antiossidante e detergente;
- dona una sensazione immediata di freschezza e sollievo;
- offre una pulizia delle mucose nasali dalle impurità quotidiane.

MODALITÀ PER L'USO

1. Prima di eseguire il lavaggio, soffiarsi il naso;
2. Separare la fiala monodose dallo strip;
3. Agitare leggermente la fiala monodose prima dell'uso;
4. Ruotare e rompere il tappo della fiala;
5. Reclinare la testa su un lato, inserire delicatamente l'estremità della fiala in una narice e chiudere con il dito l'altra narice. Instillare la soluzione premendo la fiala ed inspirare contemporaneamente;
6. Massaggiare il lato esterno della narice;

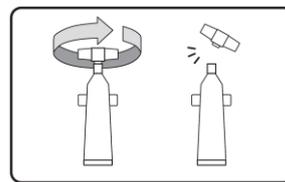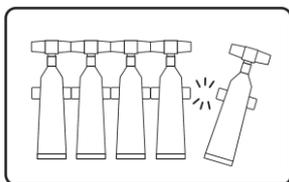

7. Ripetere la stessa operazione anche per l'altra narice;
8. L'uso della fiala in posizione capovolta facilita la fuoriuscita del liquido;
9. La soluzione può essere erogata, seguendo le medesime modalità d'uso, anche con l'utilizzo di accessori nebulizzatori composti da siringa e nebulizzatore. In questo caso si raccomanda di seguire le indicazioni dell'accessorio.

FREQUENZA D'USO

1-2 fiale per narice, 2-3 volte al giorno o secondo parere del medico.

COMPOSIZIONE

Sodio Cloruro 2%, Ascorbil Glucoside, Tween 80, Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio fosfato bibasico diidrato, acqua purificata.

CONFEZIONE

La confezione è composta da 20 fiale monodose da 5 mL in strip da 5 fiale.

AVVERTENZE

- ✓ Prodotto è solamente per uso nasale, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d'uso;
- ✓ Consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento;
- ✓ Prima di aprire la fiala per la somministrazione è consigliato detergere accuratamente le mani;
- ✓ Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione;
- ✓ In caso di reazioni avverse durante l'uso, sospendere immediatamente il trattamento e consultare un medico;
- ✓ La somministrazione di farmaci per via nasale in contemporanea con il lavaggio nasale deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni;
- ✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini;
- ✓ Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;
- ✓ Una volta aperta la fiala utilizzare immediatamente il contenuto e non riutilizzare il contenuto residuo;
- ✓ Conservare le fiale non utilizzate all'interno dell'astuccio;
- ✓ In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.


VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra.



: Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Carpi (MO), Italia



STERILE A

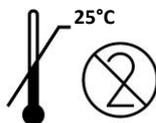

Rev.01 Gennaio 2024

Informazione facoltativa



: XXXXXXX