

FOURHYAL

INDICAZIONI

La goccia oculare **FourHyal** della gamma INNODROPS è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione leggermente iposmolare, viscosa, sterile, a pH fisiologico, priva di conservanti, priva di fosfati a base di Acido ialuronico.

L'elevata concentrazione di Acido ialuronico conferisce all'occhio una maggiore idratazione e in caso di alterazioni del film lacrimale ne ristabilisce l'equilibrio.

FourHyal è indicata per proteggere, idratare e lubrificare la superficie oculare donando sollievo in caso di arrossamento, bruciore, secchezza e affaticamento oculare nei casi di:

- sindrome dell'occhio secco,
- stress ambientale (polveri, allergeni, fumo, aria condizionata, inquinamento ambientale),
- stress visivi dovuti principalmente ad un uso prolungato dei dispositivi elettronici (computer, televisione, videotermini), studio intenso e guida prolungata.

FourHyal può essere somministrata nel trattamento post-operatorio per alleviare i sintomi da occhio secco e durante l'uso delle lenti a contatto per migliorare l'applicazione ed il comfort.

MODALITÀ PER L'USO:

1. Rompere il sigillo di sicurezza del flacone
2. Lavarsi accuratamente le mani
3. Rimuovere il tappo protettivo
4. Premere delicatamente il corpo del contenitore ed instillare 1/2 gocce in ogni occhio
5. Dopo l'instillazione richiudere immediatamente il flacone, riporlo nell'astuccio e riutilizzare il contenuto residuo entro 3 mesi
6. Il prodotto è monopaziente per evitare possibili contaminazioni
7. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto



FREQUENZA D'USO

Instillare 1-2 gocce per occhio, 2-3 volte al giorno o secondo parere del medico

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico 0,4%, sodio cloruro, sodio citrato tribasico diidrato, acido citrico monoidrato, acqua purificata.

CONFEZIONE

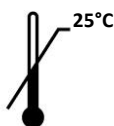
La confezione è composta da 1 flacone polidose da 10 mL. Il contenitore è richiudibile.

AVVERTENZE

- Il prodotto è solamente per uso oftalmico, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d'uso.
- Una volta aperto, il flacone può essere richiuso con l'apposito tappo ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 3 mesi per evitare possibili contaminazioni del prodotto.
- Prima dell'instillazione controllare che non vi sia alcun residuo sul foro dell'erogatore, se presente pulire con panno bagnato e lasciare cadere una goccia prima dell'utilizzo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità di erogazione del flacone.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- Eventualmente accertarsi presso il proprio ottico della compatibilità delle gocce oculari con le lenti a contatto utilizzate.
- In caso di reazioni avverse durante l'uso sospendere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.
- In caso di necessità, consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- L'eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- In caso di superficie oculare compromessa o cornea danneggiata consultare il medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra

: Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Carpi (MO), Italia

**Rev.01 Febbraio 2024****Informazione facoltativa**

: XXXXXXX