

PROTECTION DROP

INDICAZIONI

La goccia oculare **Protection Drop** della gamma INNODROPS è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione leggermente iposmolare, sterile, a pH fisiologico, priva di conservanti, a base di Ectoina e Acido ialuronico.

L'ectoina è una molecola naturale in grado di proteggere i tessuti oculari dai danni esterni, tra cui quelli generati dalle radiazioni UV dei raggi solari o dalla luce blu artificiale emessa da videotermini. Grazie alla sua azione antiossidante contro i radicali liberi inibisce i danni foto-ossidativi contro proteine e lipidi, riduce il rilascio di mediatori dello stress e favorisce la produzione di agenti protettivi. Inoltre, stabilizza lo strato lipidico del film lacrimale, adibito al controllo dell'evaporazione lacrimale.

L'acido ialuronico, polimero ad elevata biocompatibilità, reintegra lo strato acquoso del film lacrimale grazie alla sua azione idratante. In associazione acido ialuronico ed ectoina stabilizzano la superficie oculare mantenendo alte concentrazioni di acqua e prevenendo la sindrome dell'occhio secco.




Protection Drop è indicata per proteggere, stabilizzare e idratare la superficie oculare in tutti quei casi di:

- fotoesposizione degli occhi ai raggi solari, al mare, in montagna o anche quotidianamente all'aperto
- uso prolungato di fonti luminose artificiali (PC, tablet, smartphone, TV)
- stress oftalmico causato da condizioni ambientali estreme, come elevata salinità, sbalzi termici, ambiente secco

Protection Drop può essere somministrata prima dell'applicazione e durante l'uso delle lenti a contatto per migliorare l'applicazione ed il comfort.

MODALITÀ PER L'USO:

1. Aprire la busta di alluminio
2. Lavarsi accuratamente le mani
3. Separare la fiala monodose dallo strip ed aprirla ruotando il tappo
4. Premere delicatamente il corpo della fiala monodose ed instillare 1/2 gocce in ogni occhio
5. Dopo l'instillazione richiudere immediatamente la fiala e riutilizzare il contenuto residuo entro le successive 12 ore
6. Conservare le fiale non utilizzate nella busta di alluminio sino al termine del contenuto
7. Il prodotto in fiala è monopaziente per evitare possibili contaminazioni
8. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto

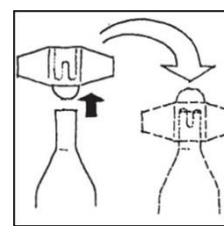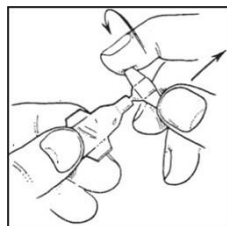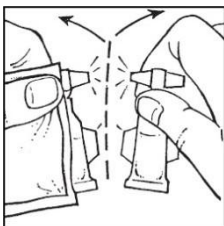

FREQUENZA D'USO: Instillare 1-2 gocce per occhio, 1-2 volte al giorno o secondo parere del medico

COMPOSIZIONE: Ectoina 2%, Acido ialuronico 0,1%, sodio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato bibasico anidro, acqua purificata.

CONFEZIONE:

La confezione è composta da 2 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 3 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 4 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 5 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 6 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

AVVERTENZE:

- Il prodotto è solamente per uso oftalmico, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d'uso.
- Una volta aperta, la fiala monodose può essere richiusa con l'apposito tappo ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 12 ore per evitare possibili contaminazioni del prodotto.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità di erogazione della fiala.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione
- Eventualmente accertarsi presso il proprio ottico della compatibilità delle gocce oculari con le lenti a contatto utilizzate.
- In caso di reazioni avverse durante l'uso sospendere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.
- In caso di necessità, consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- L'eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- In caso di superficie oculare compromessa o cornea danneggiata consultare il medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra.




Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Carpi (MO), Italia



0425



STERILE A

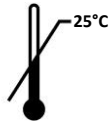

Informazione facoltativa



XXXXXXXX