

INDICAZIONI

Soluzione idratante senza conservanti, appositamente studiata per detergere le lenti a contatto e assicurare all'occhio una protezione ottimale.

Nei test clinici questa soluzione è risultata perfettamente indicata per tutte le lenti a contatto rigide gaspermeabili e per tutte le lenti a contatto morbide idrofile.

Per chi è indicata?

La soluzione è indicata per coloro che tendono ad avere le superfici delle lenti a contatto appannate e oleose. Discioglie sostanze lipofile e impurità del liquido lacrimale. Ideale per chi porta le lenti a contatto a lungo tutti i giorni.

Istruzioni per l'uso

Instillare 1-2 gocce nel bordo esterno della palpebra, a seconda delle necessità. È possibile ripetere l'operazione più volte al giorno, anche con le lenti a contatto applicate sull'occhio.

AVVERTENZE:

- La soluzione non va usata qualora si manifestino allergie a una delle sostanze contenute. Se dovessero verificarsi arrossamenti della congiuntiva o altri disturbi oculari, si consulti immediatamente l'oculista o il contattologo o il farmacista.
- Dopo l'apertura, la fiala può essere richiusa con l'apposito tappo ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 12 ore; anche il flacone può essere richiuso dopo l'apertura, ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 3 mesi, per evitare possibili contaminazioni del prodotto.
- Per evitare una possibile contaminazione batterica della soluzione, non toccare l'estremità della fiala e del flacone.
- Se dopo l'uso si notasse una diminuzione temporanea della facoltà visiva, si dovrebbe evitare di guidare motoveicoli o di azionare macchine finché la situazione non si è normalizzata.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- In caso di necessità, consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- L'eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

COMPOSIZIONE: Calcio cloruro 1,8 mmol/l, Magnesio solfato 0,81 mmol/l, Potassio cloruro 5,37 mmol/l, Acido ialuronico 0,075%, Idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) 0,05%, Tween 20, Sodio cloruro, Acido borico, Sodio tetraborato decaidrato, Acqua purificata.

CONFEZIONE:

LENS & LID MD: La confezione è composta da 4 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile. **REF 050370**


LENS & LID: La confezione è composta da 1 flacone polidose da 10 mL. Il contenitore è richiudibile. **REF 050371**

La soluzione «**LENS&LID**» e «**LENS&LID MD**» possono essere impiegati provvisoriamente e in situazioni eccezionali anche come soluzione di conservazione per tutti i tipi di lenti a contatto.

VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra



: Enable Innovations S.r.l. Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Carpi (MO), Italia

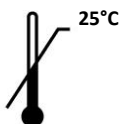

Rev.01 - Febbraio 2024

Informazioni facoltative

