

F1b

INDICAZIONI

INNODROPS F1b della gamma INNODROPS è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione ipotonica leggermente viscosa, sterile, a pH fisiologico, priva di conservanti, a base di estratto secco di Perilla Frutescens in combinazione con acido ialuronico contenuta in strip da 5 fiale monodose riempiti a 0,5ml.

L'estratto secco di Perilla Frutescens, grazie alla presenza dei polifenoli, svolge un'azione antiossidante che va a contrastare gli stati di arrossamento ed irritazione causati dagli stress ossidativi dovuto a fattori esterni sfavorevoli, mentre l'acido ialuronico, polimero ad elevata biocompatibilità, stabilizza e reintegra lo strato acquoso del film lacrimale grazie alla sua azione lubrificante ed idratante.




INNODROPS F1b è indicata per:

- alleviare e contrastare sensazioni temporanee di fastidio agli occhi come arrossamento, secchezza, sensazioni di corpi estranei causate da condizioni atmosferiche ed ambientali sfavorevoli (aria condizionata, clima secco, impianti di riscaldamento, vento, inquinamento, polveri, fumo, allergeni);
- alleviare stati di affaticamento oculare da stress visivi come un lungo periodo di guida o di studio, o dall'uso prolungato di dispositivi elettronici (TV, smartphone, computer) e/o delle lenti a contatto, o dall'eccessiva esposizione alla luce;
- alleviare la sensazione di occhio secco occasionale correlata a blefariti in corso, e favorire l'allontanamento e la rimozione di eventuali secrezioni;
- alleviare stati di congiuntivite allergica e favorire l'allontanamento e la rimozione di eventuali secrezioni.

INNODROPS F1b può essere somministrato prima dell'applicazione e durante l'uso delle lenti a contatto per migliorare l'applicazione ed il comfort.


MODALITÀ PER L'USO:

1. Aprire la busta di alluminio
2. Lavarsi accuratamente le mani
3. Separare la fiala monodose dallo strip ed aprirla ruotando il tappo
4. Premere delicatamente il corpo della fiala monodose ed instillare 2/3 gocce in ogni occhio
5. Dopo l'instillazione richiudere immediatamente la fiala e riutilizzare il contenuto residuo entro le successive 12 ore
6. Conservare le fiale non utilizzate nella busta di alluminio sino al termine del contenuto
7. Il prodotto in fiala è monopaziente per evitare possibili contaminazioni
8. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto

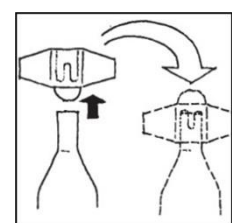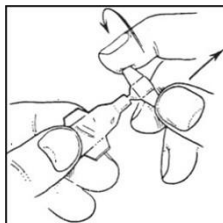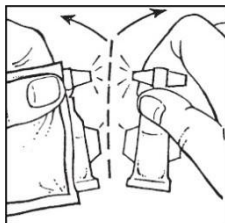

FREQUENZA D'USO: Instillare 2/3 gocce per occhio, 2-3 volte al giorno o secondo parere del medico

COMPOSIZIONE: Estratto secco di Perilla (titolato in polifenoli $\geq 2,5\%$) 0,1%, acido ialuronico sale sodico 0,25%, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico anidro, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua purificata.

		FOGLIO ILLUSTRATIVO	
Oggetto:		INNODROPS F1b Gocce Oculari	
Rev.06 di Gennaio 2025		Pagina 2/3	

CONFEZIONE: La confezione è composta da 2 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5 mL è richiudibile.

La confezione è composta da 3 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 4 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 5 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.

La confezione è composta da 6 buste in alluminio ognuna contenente 1 strip da 5 fiale. Ciascuna fiala monodose riempita a 0,5mL è richiudibile.


AVVERTENZE:

- Il prodotto è solamente per uso oftalmico, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d'uso
- Una volta aperta, la fiala monodose può essere richiusa con l'apposito tappo ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 12 ore per evitare possibili contaminazioni del prodotto
- Non utilizzare il prodotto se la busta in alluminio è danneggiata oppure se le fiale non sono perfettamente integre
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità di erogazione della fiala
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione
- Eventualmente accertarsi presso il proprio ottico della compatibilità delle gocce oculari con le lenti a contatto utilizzate
- In caso di reazioni avverse durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico
- In caso di necessità, consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento
- L'eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni
- In caso di superficie oculare compromessa o cornea danneggiata consultare il medico
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra



: Enable Innovations S.r.l. Via Claudio Tolomeo n°26; 41012 Carpi (MO), Italia

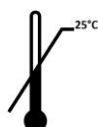

Oggetto:

INNODROPS F1b Gocce Oculari

Rev.06 di Gennaio 2025

Pagina 3/3

Pittogramma facoltativo

: XXXXXXX

Rev.06 - Gennaio 2025