

Soluzione ipertonica da nebulizzare a base di Acido ialuronico, estratto secco di Perilla e acque distillate vegetali di Boswellia, Grindelia e Sambuco.

10 fiale monodose da 3mL per Aerosol.

CARATTERISTICHE

Soluzione S2 è un Dispositivo Medico ad uso inalatorio a base di estratto secco di Perilla, acque distillate vegetali di Boswellia, Grindelia e Sambuco in combinazione con Acido ialuronico e Sodio Cloruro 2,0%.

Soluzione S2 è una soluzione pronta all'uso per aerosol, lievemente ipertonica, sterile.




INDICAZIONI

Soluzione S2 è indicata per il trattamento e la prevenzione delle alterazioni del distretto respiratorio, correlate a sindromi influenzali, tosse, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti; permette di risolvere più velocemente la sintomatologia. La combinazione dei componenti presenti nella **soluzione S2** garantisce un'azione protettiva, emolliente ed idratante a livello dell'epitelio respiratorio ed in associazione alla leggera ipertonica della soluzione, permette una migliore rimozione del muco in eccesso e contribuisce alla normalizzazione della clearance mucociliare, riducendo così il contatto tra la mucosa ed agenti patogeni ed irritanti, e quindi il rischio di irritazioni allergiche, infezioni batteriche e virali. Inoltre, l'azione antiossidante dell'estratto secco di Perilla, favorisce il ripristino dell'equilibrio fisiologico delle alte vie respiratorie.

La nebulizzazione della **soluzione S2** è ottimale per la pulizia e l'idratazione delle vie respiratorie e per favorire l'eliminazione del muco in eccesso. **Soluzione S2** non contiene conservanti.

MODALITA' D'USO:

1. Soluzione pronta all'uso, non diluire
2. Prima di iniziare la seduta soffiarsi il naso
3. Flettere la fiala monodose nelle due direzioni e staccarla dallo strip a cui è saldata
4. Agitare leggermente la fiala monodose prima dell'uso
5. Ruotare e rompere il tappo della fiala
6. Esercitare una moderata pressione sulle pareti della fiala monodose, far uscire la soluzione ed immetterla nell'ampolla del nebulizzatore (apparecchio per aerosol)
7. Durante la seduta respirare regolarmente, la durata è di circa 4-5 minuti
8. Non utilizzare l'eventuale residuo della fiala e/o nell'ampolla del nebulizzatore dopo l'uso

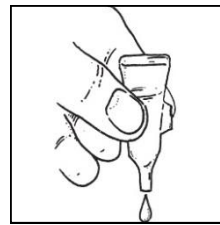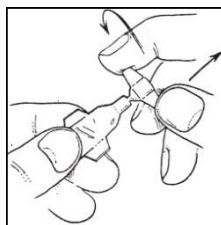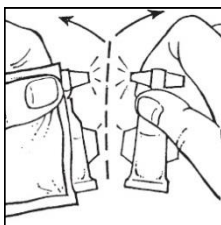

FREQUENZA D'USO:

- Nebulizzare una fiala da 3mL una/due volte al giorno, o secondo parere del medico
- Il prodotto è utilizzabile con le tipologie di apparecchi per aerosol (a pistone ed a ultrasuoni) e docce nasali

COMPOSIZIONE:

Sodio cloruro 2,0%, Acido ialuronico, Estratto secco di Perilla (*Perilla Frutescens*) semi titolati in polifenoli 2,5%, Acqua distillata di Boswellia (*Boswellia Serrata*), Acqua distillata di Grindelia (*Grindelia Robusta*), Acqua distillata di Sambuco (*Sambucus Nigra*), Sodio diidrogeno fosfato monoidrato, Sodio fosfato dibasico diidrato, acqua purificata.

CONFEZIONE: La confezione è composta da 10 fiale monodose da 3mL, in strip da 5 fiale.

AVVERTENZE:

- ✓ Il prodotto è solamente per uso inalatorio, non ingerire o usare come goccia oculare.
- ✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- ✓ Consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- ✓ Non utilizzare al di sotto dei 3 anni.
- ✓ Prima di aprire la fiala per la somministrazione è consigliato detergere accuratamente le mani.
- ✓ Durante l'immissione nell'ampolla non toccare altre superfici con l'estremità di erogazione della fiala.
- ✓ Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- ✓ In caso di disturbi come broncospasmo o tosse o qualsiasi percezione di irritazione durante l'uso sospendere immediatamente il trattamento e consultare un medico o il farmacista.
- ✓ La somministrazione di farmaci per via inalatoria in contemporanea con la soluzione inalatoria deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- ✓ Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- ✓ Una volta aperta la fiala versare immediatamente il contenuto e non riutilizzare il contenuto residuo.
- ✓ Conservare le fiale non utilizzate all'interno dell'astuccio.
- ✓ In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITA': 36 mesi a confezione integra.



Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°26; 41012 Carpi (MO), Italia



Informazione facoltativa:



Rev.06 Dicembre 2025