

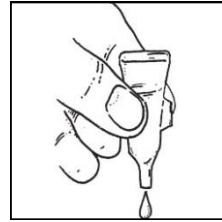
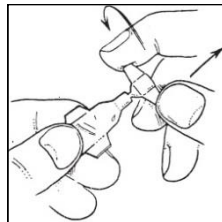
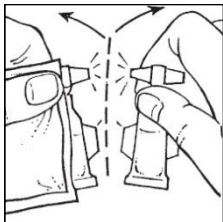
INDICAZIONI

Soluzione S1 è un Dispositivo Medico ad uso inalatorio costituito da una soluzione lievemente ipertonica, sterile, a base di sodio cloruro 2% ed estratti vegetali. È una soluzione da nebulizzare pronta all'uso per aerosol contenuta in strip da 5 fiale monodose riempiti a 3ml.

Soluzione S1 è indicato nelle affezioni acute e croniche delle alte vie respiratorie, in particolare del distretto rinosinusale e rinofaringeo. **Soluzione S1**, grazie alla leggera ipertonia, garantisce l'idratazione della mucosa e la fluidificazione del muco in eccesso, facilitandone la rimozione e ripristinando un'adeguata funzionalità mucociliare. Gli estratti vegetali di Pompelmo e di Propoli riducono il rischio di sviluppo di infezioni batteriche e virali. **Soluzione S1** inoltre ripristina il fisiologico equilibrio delle alte vie respiratorie.

MODALITÀ D'USO

1. Prima di iniziare la seduta soffiarsi il naso;
2. Separare la fiala monodose dallo strip;
3. Agitare leggermente la fiala monodose prima dell'uso;
4. Ruotare e rompere il tappo della fiala;
5. Esercitare una moderata pressione sulle pareti della fiala monodose, far uscire la soluzione ed immetterla nell'ampolla del nebulizzatore (apparecchio per aerosol a pistone e a ultrasuoni), senza diluirla;
6. Durante la seduta respirare regolarmente;
7. Non utilizzare l'eventuale residuo della fiala e/o nell'ampolla del nebulizzatore dopo l'uso;

**FREQUENZA D'USO:**

- Una fiala da 3ml una/due volte al giorno, o secondo parere del medico;
- Nelle affezioni acute come rinosinusi, siano esse di natura allergica oppure infettiva, si consigliano 2 inalazioni al giorno per un minimo di 5 giorni consecutivi;
- Il prodotto è utilizzabile con le tipologie di apparecchi per aerosol a pistone e a ultrasuoni.

COMPOSIZIONE

Sodio cloruro 2%, Estratto secco di semi di Pompelmo (*Citrus paradisi*), Estratto secco liofilizzato di Propoli (*Propolis*) titolato in galangina 2,5%, Estratto secco di Timo serpillio (*Thymus serpyllum*), Sodio diidrogeno fosfato monoidrato, Sodio fosfato dibasico diidrato, maltodestrina, acqua purificata.

CONFEZIONE

La confezione è composta da 10 fiale monodose da 3 ml in strip da 5 fiale.

AVVERTENZE

- ✓ Il prodotto è solamente per uso inalatorio, non ingerire o utilizzare diversamente dall'indicazione d'uso;
- ✓ Consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento;
- ✓ Prima di utilizzare il dispositivo è indicato detergere accuratamente le mani;

Oggetto:

Soluzione Inalatoria S1 a base di sodio cloruro ed estratti vegetali, soluzione sterile in fiale monodose

Rev. 07 – Maggio 2025

Pagina 2/2

- ✓ Durante l'immissione nell'ampolla non toccare altre superfici con l'estremità di erogazione della fiala;
- ✓ Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione;
- ✓ In caso di disturbi come broncospasmo, tosse o qualsiasi percezione di irritazione durante l'uso, sospendere immediatamente il trattamento e consultare il medico o il farmacista;
- ✓ Non utilizzare il dispositivo medico miscelato con farmaci per via inalatoria;
- ✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini;
- ✓ Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;
- ✓ Una volta aperta la fiala versare immediatamente il contenuto e non riutilizzare il contenuto residuo;
- ✓ Conservare le fiale non utilizzate all'interno dell'astuccio;
- ✓ In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ

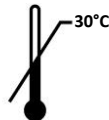
36 mesi a confezione integra.



Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°26; 41012 Carpi (MO), Italia



STERILE A

**Informazione facoltativa:**

Rev.07 – Maggio 2025