

## INDICAZIONI

La **soluzione S5**, della gamma IN-NOSE aerosol, è un Dispositivo Medico ad uso inalatorio costituito da una soluzione ipertonica, sterile, senza conservanti e pronta all'uso, a base di sale di Cervia, Acqua Madre delle Terme di Cervia in combinazione con acido ialuronico, contenuta in strip da 5 fiale monodose.




**Soluzione S5** è indicata per il trattamento delle alterazioni acute e croniche delle alte vie respiratorie dovute ad affezioni rinofaringee quali raffreddore, rinite, tosse, sinusite, rinite allergica e otiti.

La combinazione del sale di Cervia e dell'Acqua Madre delle Terme di Cervia, garantisce un'azione fluidificante, decongestionante ed eutrofica sulla mucosa respiratoria, permettendo il ripristino della clearance mucociliare e favorendo la rimozione del muco in eccesso. L'acido ialuronico invece ripristina il livello di idratazione, donando sollievo alla mucosa irritata.

**Soluzione S5** è indicata per adulti e bambini al di sopra dei 2 anni di età.

## MODALITÀ PER L'USO

1. Prima di iniziare la seduta soffiarsi il naso;
2. Separare la fiala monodose dallo strip;
3. Agitare leggermente la fiala monodose prima dell'uso;
4. Ruotare e rompere il tappo della fiala;
5. Esercitare una moderata pressione sulle pareti della fiala monodose, far uscire la soluzione ed immergerla nell'ampolla del nebulizzatore (apparecchio per aerosol), senza diluirla;
6. Non utilizzare l'eventuale residuo della fiala e/o nell'ampolla del nebulizzatore dopo l'uso;

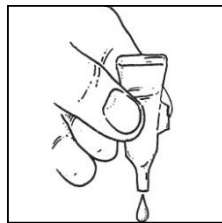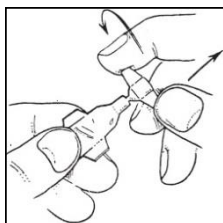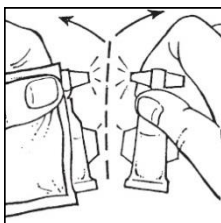

## FREQUENZA D'USO

Nebulizzare una fiala da 3mL o da 5mL da uno a due volte al giorno o secondo parere del medico. Il prodotto è utilizzabile con tutte le tipologie di apparecchi per aerosol a pistone e a ultrasuoni.

## COMPOSIZIONE

Sale marino integrale di Cervia 2%, Acqua madre salina delle Terme di Cervia, Sodio ialuronato, Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio fosfato bibasico diidrato, acqua purificata.

## CONFEZIONE

La confezione è composta da 10 fiale monodose da 3 ml in strip da 5 fiale.

La confezione è composta da 10 fiale monodose da 5 ml in strip da 5 fiale.

## AVVERTENZE

- ✓ Il prodotto è solamente per uso inalatorio, non ingerire o utilizzare diversamente dall'indicazione d'uso.
- ✓ Consultare il medico per l'uso in gravidanza, allattamento e nei bambini al di sotto di 2 anni.
- ✓ Non utilizzare al di sotto dei 2 anni, in quanto in questa fascia di età le caratteristiche fisiologiche delle vie respiratorie portano ad una limitata capacità di drenaggio del muco bronchiale.
- ✓ Prima di aprire la fiala per la somministrazione è consigliato detergere accuratamente le mani;
- ✓ Durante l'immissione nell'ampolla non toccare altre superfici con l'estremità di erogazione della fiala.
- ✓ Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- ✓ In caso di disturbi come broncospasmo, tosse o qualsiasi percezione di irritazione durante l'uso, sospendere immediatamente il trattamento e consultare il medico o il farmacista.
- ✓ Non utilizzare il dispositivo medico miscelato con farmaci per via inalatoria
- ✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- ✓ Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- ✓ Una volta aperta la fiala versare immediatamente il contenuto e non riutilizzare il contenuto residuo.
- ✓ Conservare le fiale non utilizzate all'interno dell'astuccio;
- ✓ In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

## VALIDITÀ

36 mesi a confezione integra.




Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°26; 41012 Carpi (MO), Italia




0425



STERILE A

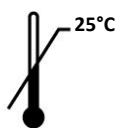

## Informazione facoltativa

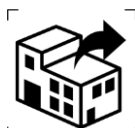

XXXXXXXXXXXX