

Oggetto:

**Spray Nasale SP4 a base di Acido ialuronico, Sale di Grotta e Acque distillate di Ribes, Camomilla, Eucalipto e Piantaggine, soluzione sterile senza conservanti in flacone da 20mL**

Rev.02 di Novembre 2025

Pagina 1/2



## Spray Nasale SP4

### INDICAZIONI

Dalla ricerca Bios Line nasce **SP4**, un Dispositivo Medico ad uso topico nasale, sterile, senza conservanti, a base di Sale di Grotta, Acido ialuronico e Acque distillate di Ribes, Camomilla, Eucalipto e Piantaggine. **SP4** è ideale come decongestionante per rimuovere i depositi di muco dalle fosse nasali in caso di congestione come raffreddori e riniti, per favorire la respirazione e per mantenere il trofismo dell'epitelio delle prime vie respiratorie. Il Sale di Grotta al 2% rende la soluzione ipertonica, contribuendo all'idratazione e alla rimozione del muco, senza causare secchezza e irritazione alle mucose mentre l'acido ialuronico forma un film protettivo sulla barriera epiteliale esercitando inoltre un'azione idratante ed emolliente che ne favorisce l'integrità. Le acque distillate di Camomilla, Eucalipto, Ribes e Piantaggine donano una piacevole sensazione balsamica.

### MODALITA' PER L'USO

1. Lavarsi accuratamente le mani e soffiarsi il naso prima dell'utilizzo
2. Agitare leggermente il flacone spray prima dell'uso
3. Rimuovere il cappuccio protettivo
4. Tenere il flacone spray con il pollice sotto la base e l'erogatore tra due dita
5. Al primo utilizzo premere la pompa spray azionandola qualche volta, fino a quando viene emessa una nebulizzazione uniforme
6. Inclinare leggermente la testa all'indietro e inserire l'erogatore in una narice
7. Spruzzare la soluzione e contemporaneamente inspirare delicatamente con il naso
8. Dopo l'uso pulire e richiudere l'erogatore spray con il proprio cappuccio protettivo
9. Il prodotto è monopaziente per evitare possibili contaminazioni

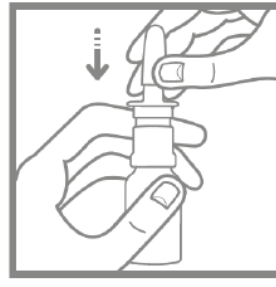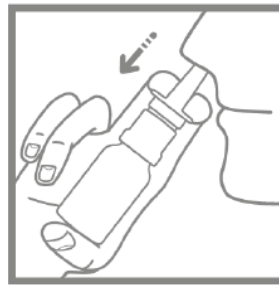

### FREQUENZA D'USO

1-2 nebulizzazioni per narice 2/3 volte al giorno, o secondo parere del medico.

### COMPOSIZIONE

Sale di Grotta 2%, Acido ialuronico, Acqua distillata di Ribes nigrum, Acqua distillata di Chamomilla recutita, Acqua distillata di Plantago lanceolata, Acqua distillata di Eucalyptus globulus, Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio fosfato bibasico diidrato, acqua purificata.

### CONFEZIONE

La confezione è composta da un flacone spray da 20mL, richiudibile.

Oggetto:

Spray Nasale SP4 a base di Acido ialuronico, Sale di Grotta e Acque distillate di Ribes, Camomilla, Eucalipto e Piantaggine, soluzione sterile senza conservanti in flacone da 20mL

Rev.02 di Novembre 2025

Pagina 2/2

**AVVERTENZE:**

- Il prodotto è solamente per uso inalatorio, non ingerire o utilizzare diversamente dall'indicazione d'uso.
- Una volta aperto e utilizzato il flacone, il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 3 mesi per evitare possibili contaminazioni del prodotto.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non toccare altre superfici, oltre la mucosa nasale, con l'estremità di erogazione del flacone.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- In caso di reazioni avverse durante l'uso, sospendere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.
- Consultare il medico per l'uso in gravidanza e allattamento.
- L'uso in età pediatrica, in particolare nei bambini di età inferiore ai 3 anni, deve avvenire previa consultazione del pediatra.
- La somministrazione di farmaci o dispositivi medici per via nasale in contemporanea con lo spray nasale deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

**VALIDITA'**

36 mesi a confezione integra.



Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°26; 41012 Carpi (MO), Italia



0425



STERILE A

**Informazione facoltativa:**

: XXXXXX