

Oggetto:
Spray Nasale – SP1V, soluzione sterile in flaconi spray da 20ml

Revisione 04 - Agosto 2025

Pagina 1/2

INDICAZIONI

IN-NOSE GREEN SPRAY della gamma IN-NOSE è un Dispositivo Medico ad uso topico nasale, a base di acido ialuronico ed estratti secchi vegetali in soluzione ipertonica tamponata, senza conservanti, contenuta in flacone spray da 20 mL.

IN-NOSE GREEN SPRAY è indicato in casi di riniti allergiche e sindromi da raffreddamento per la pulizia delle cavità nasali, che grazie all'ipertonicità della soluzione ed alla presenza dell'acido ialuronico diluisce e rimuove residui di muco, ristabilendo la clearance mucociliare. Inoltre, la combinazione dell'acido ialuronico con gli estratti secchi vegetali di Perilla e Polygonum consente di svolgere un'azione emolliente ed antiossidante proteggendo la mucosa da agenti esterni quali fumo, smog, polvere, polline, possibili cause di fenomeni irritativi ed allergici.

MODALITÀ PER L'USO:

1. Lavarsi accuratamente le mani
2. Soffiarsi il naso prima dell'utilizzo
3. Agitare leggermente il flacone spray prima dell'uso
4. Rimuovere il cappuccio protettivo
5. Tenere il flacone spray con il pollice sotto la base e l'erogatore tra due dita
6. Al primo utilizzo premere la pompa spray azionandola qualche volta, fino a quando viene emessa una nebulizzazione uniforme
7. Inclinare leggermente la testa all'indietro e inserire l'erogatore in una narice
8. Spruzzare e contemporaneamente respirare delicatamente con il naso
9. Dopo l'uso pulire e richiudere l'erogatore spray con il proprio cappuccio protettivo
10. Il prodotto è monopaziente per evitare possibili contaminazioni



FREQUENZA D'USO: 1-2 nebulizzazioni per narice 2/3 volte al giorno, per 7-10 giorni o secondo parere del medico.

COMPOSIZIONE: Sodio Ialuronato, Sodio Cloruro (2%), Estratto secco di Perilla Frutescens (titolato in polifenoli $\geq 2,5\%$), Estratto secco di Polygonum Cuspidatum (titolato in resveratrolo $\geq 20\%$), sodio fosfato bibasico diidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua purificata.

CONFEZIONE: La confezione è composta da un flacone spray da 20 mL, richiudibile.

Oggetto:

Spray Nasale – SP1V, soluzione sterile in flaconi spray da 20ml

Revisione 04 - Agosto 2025

Pagina 2/2

AVVERTENZE:

- Il prodotto è solamente per uso inalatorio, non ingerire o utilizzare diversamente dall'indicazione d'uso.
- Una volta aperto e utilizzato il flacone, il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 3 mesi per evitare possibili contaminazioni del prodotto.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non toccare altre superfici, oltre la mucosa nasale, con l'estremità di erogazione del flacone.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- In caso di reazioni avverse (bruciore, fenomeni irritativi ecc.) durante l'uso, sospendere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.
- Consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- La somministrazione di farmaci o dispositivi medici per via nasale in contemporanea con lo spray nasale deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra.

Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°26; 41012 Carpi (MO), Italia



0425



STERILE A

**Informazione facoltativa:**

: XXXXXX