

Oggetto: Soluzione Inalatoria S4 a base di Acqua Termale Caesius di Bardolino e Acido ialuronico a medio peso molecolare senza conservanti, soluzione sterile in fiale monodose 3ml

Rev. 03 – Marzo 2026

Pagina 1/2

INDICAZIONI

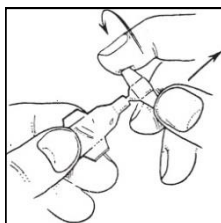
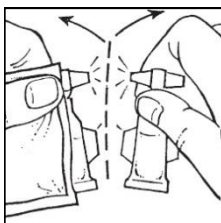
La **Soluzione S4** è un Dispositivo Medico ad uso inalatorio costituito da una soluzione lievemente ipertonica a base di Acqua Termale bicarbonato-calcica delle Terme Caesius di Bardolino (Vr) in combinazione con Acido ialuronico.

È una soluzione sterile e senza conservanti, da nebulizzare e pronta all'uso per aerosol.

Soluzione S4 è indicata nel trattamento delle alterazioni delle alte vie respiratorie, correlate a raffreddori, sinusiti, riniti e flogosi delle prime vie aeree. **Soluzione S4**, grazie alla combinazione di acido ialuronico, acqua termale ed alla leggera ipertonia, garantisce un'azione decongestionante ed idratante per la mucosa nasale che permette la rimozione del muco ed il ripristino della clearance mucociliare. La nebulizzazione della **Soluzione S4** è ottimale anche per la fisiologica pulizia della cavità nasale e delle alte vie respiratorie.

MODALITÀ PER L'USO:

1. Soluzione pronta all'uso, non diluire;
2. Prima di iniziare la seduta soffiarsi il naso;
3. Separare la fiala monodose dallo strip;
4. Agitare leggermente la fiala monodose prima dell'uso;
5. Ruotare e rompere il tappo della fiala;
6. Esercitare una moderata pressione sulle pareti della fiala monodose, far uscire la soluzione ed immetterla nell'ampolla del nebulizzatore (apparecchio per aerosol);
7. Non utilizzare l'eventuale residuo della fiala e/o nell'ampolla del nebulizzatore dopo l'uso;


FREQUENZA D'USO:

Nebulizzare una fiala da 3mL da una a due volte al giorno o secondo parere del medico, senza diluirla. Il prodotto è utilizzabile con tutte le tipologie di apparecchi per aerosol a pistone e a ultrasuoni.

COMPOSIZIONE: Acqua Termale Caesius di Bardolino, Sodio ialuronato 0,1%, Sodio Cloruro 2%, Sodio fosfato monobasico monidrato, Sodio fosfato dibasico diidrato.

CONFEZIONE: La confezione è composta da 10 fiale monodose da 3 ml in strip da 5 fiale

AVVERTENZE:

- ✓ Il prodotto è solamente per uso inalatorio, non ingerire o utilizzare diversamente dall'indicazione d'uso.
- ✓ Consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- ✓ Prima di aprire la fiala per la somministrazione è consigliato detergere accuratamente le mani;
- ✓ Durante l'immissione nell'ampolla non toccare altre superfici con l'estremità di erogazione della fiala.
- ✓ Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- ✓ In caso di disturbi come broncospasmo, tosse o qualsiasi percezione di irritazione durante l'uso, sospendere

Oggetto:

Soluzione Inalatoria S4 a base di Acqua Termale Caesius di Bardolino e Acido ialuronico a medio peso molecolare senza conservanti, soluzione sterile in fiale monodose 3ml

Rev. 03 – Marzo 2026

Pagina 2/2

immediatamente il trattamento e consultare il medico o il farmacista.

- ✓ Non utilizzare il dispositivo medico miscelato con farmaci per via inalatoria.
- ✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- ✓ Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- ✓ Una volta aperta la fiala versare immediatamente il contenuto e non riutilizzare il contenuto residuo.
- ✓ Conservare le fiale non utilizzate all'interno dell'astuccio.
- ✓ In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra.



Enable Innovations S.r.l. - Via Claudio Tolomeo n°26; 41012 Carpi (MO), Italia

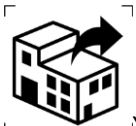


STERILE A



Rev.03 – Marzo 2026

Informazione facoltativa



XXXXXXXX